

LAVANOX®-SERAG WUNDSPÜLLÖSUNG

Humanes Medizinprodukt

Auf Basis von Wasser mit 0,08 % Natriumhypochlorit



Zusammensetzung

Wasser

Natriumhypochlorit/hypochlorige Säure < 0,08% (elektro-chemisch aktivierte Mineralsalzlösung)

Anwendung

Eine Wunde sollte zuerst von Schmutz, Blut und Belägen gereinigt werden. Hierzu werden die betroffenen Areale mit LAVANOX®-Serag Wundspüllösung in großzügiger Menge intensiv gespült. Bei starken Verunreinigungen kann die Anwendung mehrmals wiederholt werden. Nach der Anwendung von LAVANOX®-Serag Wundspüllösung muss nicht mit einer weiteren Lösung nachgespült werden (d. h. Rückstände von LAVANOX®-Serag Wundspüllösung können in der Wunde verbleiben). Verkrustete und schwer ablösbare Wundauflagen oder Verbände werden mit LAVANOX®-Serag Wundspüllösung reichlich getränkt, bis sie durchnässt sind. Nach kurzer Wartezeit können diese vorsichtig schmerzarm abgelöst werden. Danach kann bei Bedarf LAVANOX®-Serag Wundspray dünn aufgetragen werden. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Ein leichter Chlorgeuch ist ein Zeichen für die Aktivität der Produkte.

Anwendungseinschränkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. LAVANOX® Wundspüllösung sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden!

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden.

Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden.

Vor Kindern sicher aufbewahren.

Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.

Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

Hersteller

Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
32120 Hildenhagen
Vertrieb:
Serag-Wiessner KG
Zum Kugelfang 8 – 12
95119 Naila

Stand der Information

2020-01

Handelsformen

Spritz-Flasche mit 250 ml

Packung mit 6 Flaschen zu 1000 ml

LAVANOX®-Serag Wundspüllösung dient der Reinigung, Befeuchtung, antimikrobiellen Dekontamination und Infektionsprophylaxe in der akuten und chronischen Wunde. Die Anwendung von LAVANOX®-Serag Wundspüllösung ist nicht reizend, nicht irritierend und gut verträglich. LAVANOX®-Serag Wundspüllösung wird zur Wundreinigung verwendet und hilft dabei, Biofilm und fibrinoide Ablagerungen zu entfernen. Außerdem unterstützt die LAVANOX®-Serag Wundspüllösung eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Für den Einsatz zur Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) geeignet. Wundgerüche werden durch den Einsatz von LAVANOX®-Serag Wundspüllösung schnell und zuverlässig eliminiert. Als Mehrdosenbehältnis ist LAVANOX®-Serag mit NaOCl/HOCl konserviert. Dies ermöglicht die Anbruchstabilität und Verwendung des Produktes über 12 Wochen hinweg.