

TESTSTREIFEN

WellionVet GLUCO CALEA Blutzucker-Teststreifen	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde, Katzen und Pferde • inkl. 3 Code-Chips (Hunde, Katzen, Pferde) • Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen 	
Handelsformen: Dose mit 10 Stück Dose mit 50 Stück	



WellionVet BELUA Blutzucker-Teststreifen	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde, Katzen und Kühe • inkl. 3 Code-Chips (Hunde, Katzen, Kühe) • Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen 	
Handelsformen: Dose mit 10 Stück Dose mit 50 Stück	



WellionVet BELUA Ketonkörper-Teststreifen	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde und Katzen • inkl. 2 Code-Chips (Hunde und Katzen) 	<ul style="list-style-type: none"> • für Kühe • inkl. 1 Code-Chip (Kühe)
<ul style="list-style-type: none"> • Einzelni foliert → Vorteil: jeder Teststreifen ist frisch → keine Probleme der Haltbarkeit nach dem Öffnen 	
Handelsformen: Packung mit 10 Stück	Handelsformen: Packung mit 20 Stück Packung mit 110 Stück



Tipps zur Verwendung der Teststreifen

- Stecken Sie den sauberen Teststreifen in das Gerät ohne das Ende des Teststreifens für die Blutprobe zu berühren.
- Führen Sie den Teststreifen an den Blutstropfen heran und tauchen Sie ihn senkrecht ein.
- Das Blut wird automatisch in den Streifen gesaugt.
- Halten Sie den Teststreifen solange in den Blutstropfen, bis das Kontrollfenster vollständig gefüllt ist.
- Das Messgerät startet mit dem Countdown und nach Ablauf der Messdauer wird das Messergebnis auf der Bildschirmanzeige angezeigt.

SICHERHEITSLANZETTEN

Wellion Sicherheits-Einmallanzetten	
	• für Katzen und Hunde
Nadelstärke	23 G blau
Stechtiefe	2,2 mm
Blutmenge	30 - 70 µl
- Perfekt geeignet für die Messung zuhause durch Tierbesitzer: - Die Nadel ist niemals sichtbar: ➤ Psychologischer Aspekt des Stechens mit der Nadel - „Verletzen“ des geliebten Haustieres - fällt weg - Optimaler Anwenderschutz: Besitzer können sich nicht versehentlich selbst verletzen - Kontaktaktivierte Auslösung: immer richtige Distanz zwischen Haut und Lanzette - Einweg-Produkt: kein mehrmaliges Verwenden möglich (falsche Sparsamkeit! stumpfe Nadeln → Schmerzen beim Einstich, unwillige Patienten, keine ausreichende Blutmenge, unzufriedene Besitzer!) - Mit dem gewöhnlichen Hausmüll zu entsorgen	
Handelsformen:	Packung mit 25 Stück Packung mit 200 Stück



WellionVet Sicherheits-Einmallanzetten	
	• für Kühe
Nadelstärke	18 G
Stechtiefe	3 mm
- Nur zur Anwendung in der Veterinärmedizin - Ausschließlich zur Anwendung bei Kühen!	
Handelsformen:	Packung mit 25 Stück



KÜHLTASCHE

Wellion FRIGO - Kühltasche	
FRIGO L	FRIGO XXL
- Aktivierung mit kaltem Wasser - ohne Gefrierschrank - ohne Strom - kühlt mit Verdunstungskälte	
Handelsform: 1 Stück 21 x 11 cm	Handelsform: 1 Stück 22 x 19 cm



ABWURFBEHÄLTER

Wellion Abwurfbehälter
Handelsform: 1 Stück

