

TESTSTREIFEN

WellionVet GLUCO CALEA Blutzucker-Teststreifen	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde, Katzen und Pferde • inkl. 3 Code-Chips (Hunde, Katzen, Pferde) • Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen 	
Handelsformen: Dose mit 10 Stück Dose mit 50 Stück	



WellionVet BELUA Blutzucker-Teststreifen	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde, Katzen und Kühe • inkl. 3 Code-Chips (Hunde, Katzen, Kühe) • Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen 	
Handelsformen: Dose mit 10 Stück Dose mit 50 Stück	



WellionVet BELUA Ketonkörper-Teststreifen (β-Hydroxybutyrat)	
<ul style="list-style-type: none"> • für Hunde und Katzen • inkl. 2 Code-Chips (Hunde und Katzen) 	<ul style="list-style-type: none"> • für Kühe • inkl. 1 Code-Chip (Kühe)
<ul style="list-style-type: none"> • Einzeln foliert → Vorteil: jeder Teststreifen ist frisch → keine Probleme der Haltbarkeit nach dem Öffnen 	
Handelsformen: Packung mit 10 Stück	Handelsformen: Packung mit 20 Stück Packung mit 110 Stück



Tipps zur Verwendung der Teststreifen

- Stecken Sie den sauberen Teststreifen in das Gerät ohne das Ende des Teststreifens für die Blutprobe zu berühren.
- Führen Sie den Teststreifen an den Blutstropfen heran und tauchen Sie ihn senkrecht ein.
- Das Blut wird automatisch in den Streifen gesaugt.
- Halten Sie den Teststreifen solange in den Blutstropfen, bis das Kontrollfenster vollständig gefüllt ist.
- Das Messgerät startet mit dem Countdown und nach Ablauf der Messdauer wird das Messergebnis auf der Bildschirmanzeige angezeigt.

SICHERHEITSLANZETTEN

Wellion Sicherheits-Einmallanzetten	
	• für Katzen und Hunde
Nadelstärke	23 G blau
Stechtiefe	2,2 mm
Blutmenge	30 - 70 µl
<ul style="list-style-type: none"> - Perfekt geeignet für die Messung zuhause durch Tierbesitzer: - Die Nadel ist niemals sichtbar: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Psychologischer Aspekt des Stechens mit der Nadel - „Verletzen“ des geliebten Haustieres - fällt weg - Optimaler Anwenderschutz: Besitzer können sich nicht versehentlich selbst verletzen - Kontaktaktivierte Auslösung: immer richtige Distanz zwischen Haut und Lanzette - Einweg-Produkt: kein mehrmaliges Verwenden möglich (falsche Sparsamkeit! stumpfe Nadeln → Schmerzen beim Einstich, unwillige Patienten, keine ausreichende Blutmenge, unzufriedene Besitzer!) - Mit dem gewöhnlichen Hausmüll zu entsorgen - Humanes Medizinprodukt 	
Handelsformen:	Packung mit 25 Stück Packung mit 200 Stück



WellionVet Sicherheits-Einmallanzetten	
	• für Kühe
Nadelstärke	18 G
Stechtiefe	3 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Nur zur Anwendung in der Veterinärmedizin - Ausschließlich zur Anwendung bei Kühen! 	
Handelsformen:	Packung mit 25 Stück



ABWURFBEHÄLTER

Wellion Abwurfbehälter	
Handelsform:	1 Stück



Wellion Sortiment

Hinweis

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei den angeführten Tieren bestimmt. Nicht zur Anwendung am Menschen bestimmt. Nicht wiederverwenden. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Gebrauchsanweisung beachten. Unzugänglich für Kinder aufbewahren. Safetylancets zusätzlich: Die Sicherheitskappe sorgt dafür, dass die Nadel steril ist. Verwenden Sie die Lanzette nicht, wenn die Sicherheitskappe bereits fehlt. Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der nationalen Behörde zu melden.

Hersteller

MED TRUST Handelsges.m.b.H., Gewerbepark 10, 7221 Marz – Austria, www.medtrust.at