

**FLÄCHENDESINFEKTION**

<b>INCIDIN™ LIQUID – Flächendesinfektion</b>			
<b>Schnell wirksame, gebrauchsfertige Flächendesinfektion zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art (Biozid)</b>			
· gebrauchsfertig		· gegen Bakterien, Viren und Pilze	
In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol			
<b>Gebrauchsanweisung:</b>			
Gebrauchsfertige Lösung auf trockenes Wischtuch geben, auf alkoholbeständige Flächen auftragen und einwirken lassen oder aus ca. 30 cm Entfernung (max. 40 ml/m <sup>2</sup> ) einsprühen und antrocknen lassen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.			
Wirksamkeit unverdünnt	Einwirkzeit	Mikrobiologische Prüfergebnisse	Einwirkzeit
Flächendesinfektion nach VAH mit/ohne mechanischer Einwirkung (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 min	RKI-DVV 01/2024* / EN 14476 (behüllte Viren)	30 sec
Schnelldesinfektion von Flächen nach VAH Methode 2015 ohne mechanische Einwirkung	1 min	DVV 2015* / EN 14476 (begrenzt viruzid) EN 14476 Adeno EN 14476 Noro	10 min 1 min 10 min
EN 13727 / EN 13624 / EN14348 (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	1 min	DVV 2015* / EN 14476 (clean) Rota	30 sec
EN 16615 (bakterizid)	1 min	EN 16777 Noro (dirty)	10 min
EN 16615 (levurozid)	1 min	EN 16777 Adeno (dirty)	5 min
EN 16615 (Methode) (tuberkulozid)	1 min	EN 16777 Vaccinia (dirty)	1 min
		*DVV 2015 (suspension test)	
<b>Handelsformen: 1 L Flasche · 5 L Kanister</b> (*Sprühpistole ggf. separat bestellen)			

