

LAVANOX® WUNDSPRAY

Humanes Medizinprodukt

Auf Basis von Wasser mit 0,08 % Natriumhypochlorit



Zusammensetzung

Wasser

Natriumhypochlorit < 0,08% (elektro-chemisch aktivierte Mineralsalzlösung)

Anwendung

Eine Wunde sollte zuerst von Schmutz, Blut und Belägen gereinigt werden. Hierzu werden die betroffenen Areale mit LAVANOX® Wundspray mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand satt nass benetzt und ggf. unterstützend mechanisch gereinigt. Bei starken Verunreinigungen kann die Anwendung mehrmals wiederholt werden. Nach der Anwendung von LAVANOX® Wundspray muss nicht mit einer weiteren Lösung nachgespült werden (d. h. Rückstände von LAVANOX® Wundspray können in der Wunde verbleiben). Verkrustete und schwer ablösbare Wundauflagen oder Verbände werden mit LAVANOX® Wundspray reichlich besprüht, bis sie durchnässt sind. Nach kurzer Wartezeit können diese vorsichtig, schmerzarm abgelöst werden. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität der Produkte.

Anwendungseinschränkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. LAVANOX® Wundspray sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden!

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden.

Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden.

Vor Kindern sicher aufbewahren.

Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.

Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

Hersteller

Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
32120 Hiddenhausen
Vertrieb:
Serag-Wiessner KG
Zum Kugelfang 8 – 12
95119 Naila

Stand der Information

2018-07

Handelsformen

75 ml Spray

LAVANOX® Wundspray dient der Reinigung, Befeuchtung, antimikrobiellen Dekontamination und Infektionsprophylaxe in der Wunde. Die Anwendung von LAVANOX® Wundspray ist nicht reizend, nicht irritierend und gut verträglich. LAVANOX® Wundspray wird zur Wundreinigung verwendet und hilft dabei, Biofilm und fibrinoide Ablagerungen zu entfernen. Außerdem unterstützt das LAVANOX® Wundspray eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Das im LAVANOX® Wundspray enthaltene Konservierungsmittel (Natriumhypochlorit) hat ein sehr breites Spektrum gegen Bakterien (inkl. *Pseudomonas aeruginosa*, MRSA/MRE), Viren und Pilze, was eine unspezifische Dekontamination auch bei Wunden ermöglicht. LAVANOX® kann ebenfalls im Bereich von Wunden mit freiliegenden Knorpeln, Sehnen, Bändern oder Knochen angewendet werden. Wundgerüche werden durch den Einsatz von LAVANOX® Wundspray schnell und zuverlässig eliminiert.