

LAVANOX-SERAG® WUNDSPRAY

Humanes Medizinprodukt

Auf Basis von Wasser mit < 0,08 % Natriumhypochlorit



Zweckbestimmung

LAVANOX-Serag® Wundspray dient der Reinigung, Befeuchtung, mechanischen Dekontamination und Infektionsprophylaxe in der akuten und chronischen Wunde. Bei der Wundreinigung hilft LAVANOX-Serag® Wundspray dabei, Biofilm und fibrinoide Ablagerungen zu entfernen. Außerdem unterstützt LAVANOX-Serag® Wundspray eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Wundgerüche werden durch den Einsatz von LAVANOX-Serag® Wundspray schnell und zuverlässig eliminiert.

Produkteigenschaften

Die Anwendung von LAVANOX-Serag® Wundspray ist nicht reizend, nicht irritierend und schmerzarm. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Rückstände von LAVANOX-Serag® Wundspray können in der Wunde verbleiben. Als Mehrdosenbehälter ist LAVANOX-Serag® Wundspray mit NaOCl/HOCl konserviert. Dies ermöglicht die Verwendung des angebrochenen Einzelproduktes über 12 Wochen.

Hinweise zur Anwendung

Eine Wunde sollte zuerst von Schmutz, Blut und Belägen gereinigt werden. Hierzu werden die betroffenen Areale mit LAVANOX-Serag® Wundspray mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand satt nass benetzt und ggf. unterstützend mechanisch gereinigt. Bei starken Verunreinigungen kann die Anwendung mehrmals wiederholt werden. Nach der Anwendung von LAVANOX-Serag® Wundspray muss nicht mit einer weiteren Lösung nachgespült werden (d. h. Rückstände von LAVANOX-Serag® Wundspray können in der Wunde verbleiben). Verkrustete und schwer ablösbare Wundauflagen oder Verbände werden mit LAVANOX-Serag® Wundspray reichlich besprüht, bis sie durchnässt sind. Nach kurzer Wartezeit können diese vorsichtig schmerzarm abgelöst werden. Danach kann bei Bedarf Wundgel dünn aufgetragen werden. Geeignet dafür sind das Wundgel und das Wundsprühgel aus der Produktlinie LAVANOX-Serag®. LAVANOX-Serag® Wundspray ohne Einschränkung bzgl. Alter und Geschlecht des Patienten angewendet werden. Es sind keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt. Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität des Konservierungssystems. LAVANOX-Serag® Wundspray kann von medizinischen Laien angewendet werden, wenn sie durch medizinische Fachkräfte eingewiesen wurden.

Anwendungseinschränkungen

LAVANOX-Serag® Wundspray sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden.

Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gelen und vorgetränkten Kompressen anwenden.

Nicht gleichzeitig mit Chlorhexidin-haltigen Produkten anwenden. Zur Anwendung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und bei Kindern unter zwei Jahren fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker. Bei Kindern bis 12 Jahren sollte die Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Bei Rötung, Schwellung oder Schmerzen im Wundbereich oder wenn sich der Zustand der Wunde nicht innerhalb

weniger Tage verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitshinweise

Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden.

Vor Kindern sicher aufbewahren.

Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.

Das Produkt nur bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

Bitte melden Sie ein potenziell schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt umgehend an Prontomed (vigilanz@prontomed.de) und die in Ihrem Land zuständige Behörde.

Zusammensetzung

Aqua

< 0,08% Natriumhypochlorit/hypochlorige Säure

Stand der Information

V01/2022.08

Vertrieb durch:

Serag-Wiessner GmbH & Co. KG

Zum Kugelfang 8 – 12

95119 Naila

Hersteller

Prontomed GmbH

Am Bahndamm 70

32120 Hiddenhausen

Handelsformen

75 ml Spray